

BODY culotte
mesures obligatoires


*circonférences prises **debout sans serrer** avec un mètre ruban sur la peau (ou sur un vêtement léger non compressif)
* circonférences **F et G** mesurées sur soutien gorge
*les éventrations et hernies **réductibles** doivent être comprimées lors de la mesure
* préciser en spécificité si technique de prise de mesure différente (assis, couché...)
exemple de formulaire avec valeurs saisies (rouge)



GE=36cm
placer le mètre ruban en bas du pubis (entrejambe) et remonter sur le ventre (en suivant la courbure) jusqu'à la ligne sous poitrine



GA=59cm
placer le mètre ruban sur les fesses (en haut du pli fessier) et remonter sur le ventre (en suivant la courbure) jusqu'à la ligne sous poitrine

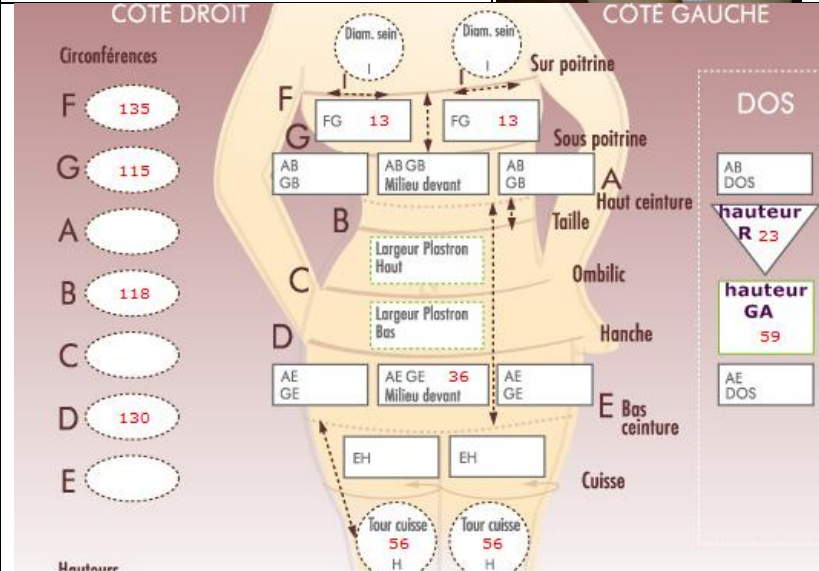

R = 23 cm
(pointe mamelon à épaule)



FG = 13 cm
(pointe mamelon à bas bonnet)



F = 135 cm



G = 115 cm



B = 118 cm



D = 130 cm



H = 56 cm

mesures facultatives



mesure à renseigner en cas de ventre bombé



mesure à renseigner en cas de ventre en tablier (ventre tombant)

