

**CORSET - GAINE - CEINTURE - P.JARR.**

**mesures obligatoires**

\*circonférences prises **debout sans serrer** avec un mètre ruban sur la peau (ou sur un vêtement léger non compressif)

\*les éventrations et hernies **réductibles** doivent être comprimées lors de la mesure

\* préciser en spécificité si technique de prise de mesure différente (assis, couché...)

**exemple de formulaire avec valeurs saisies (rouge)**




tour taille  
B

**B = 95 cm**



tour hanche  
D

**D = 102.5 cm**

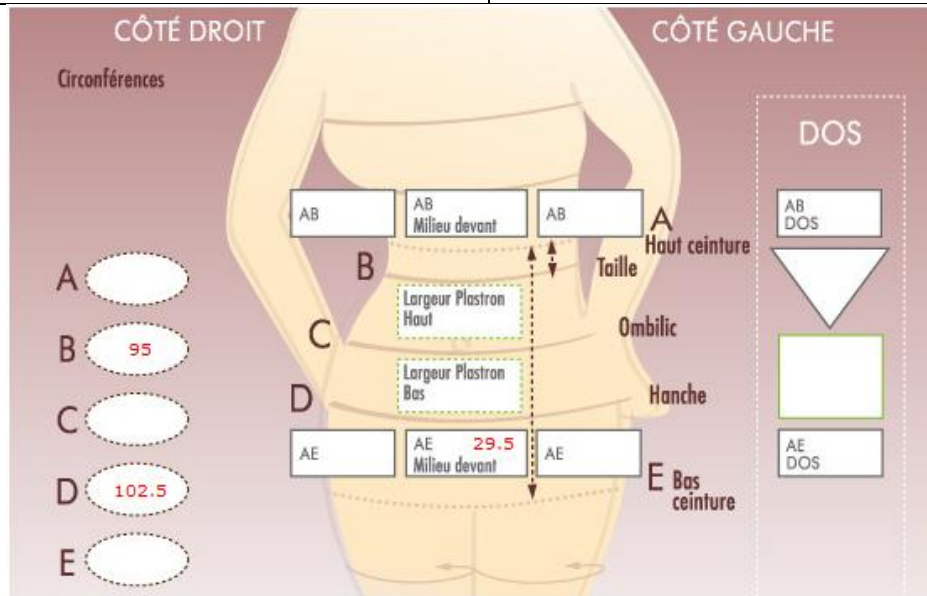

hauteur AE  
(devant)

**AE = 29.5 cm**

placer le mètre ruban en bas du produit (entrejambe bas pubis) et remonter sur le ventre (en suivant la courbure) jusqu'en haut du produit (position : ombilic milieu devant, taille ou sous poitrine... en fonction de la hauteur souhaitée)

**mesures facultatives**



hauteur AE  
(dos)

placer le mètre ruban sur les fesses (en haut du pli fessier) et remonter sur le dos (en suivant la courbure) jusqu'en haut du produit (position : taille ou sous poitrine... en fonction de la hauteur souhaitée)



tour A  
(haut)



tour C  
(ombilic)

mesure à renseigner en cas de ventre bombé



tour E  
(bas)

mesure à renseigner en cas de ventre en tablier (tombant)



hauteur AE  
(coté)



largeur plastron  
(haut et bas)



hauteur AB  
(dos)



hauteur AB  
(coté)