

CULOTTE GAINE


mesures obligatoires

*circonférences prises **debout sans serrer** avec un mètre ruban sur la peau (ou sur un vêtement léger non compressif)


*les éventrations et hernies **réductibles** doivent être comprimées lors de la mesure

* préciser en spécificité si technique de prise de mesure différente (assis, couché...)


exemple de formulaire avec valeurs saisies (rouge)

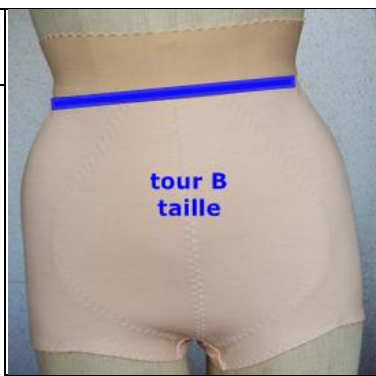



B = 115 cm

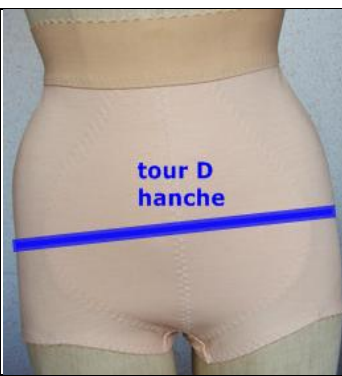

D = 123 cm

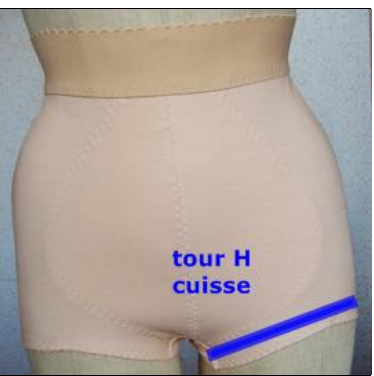


H=59 droit/60 gauche

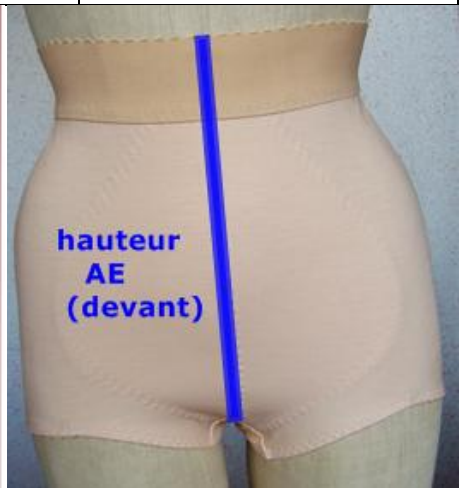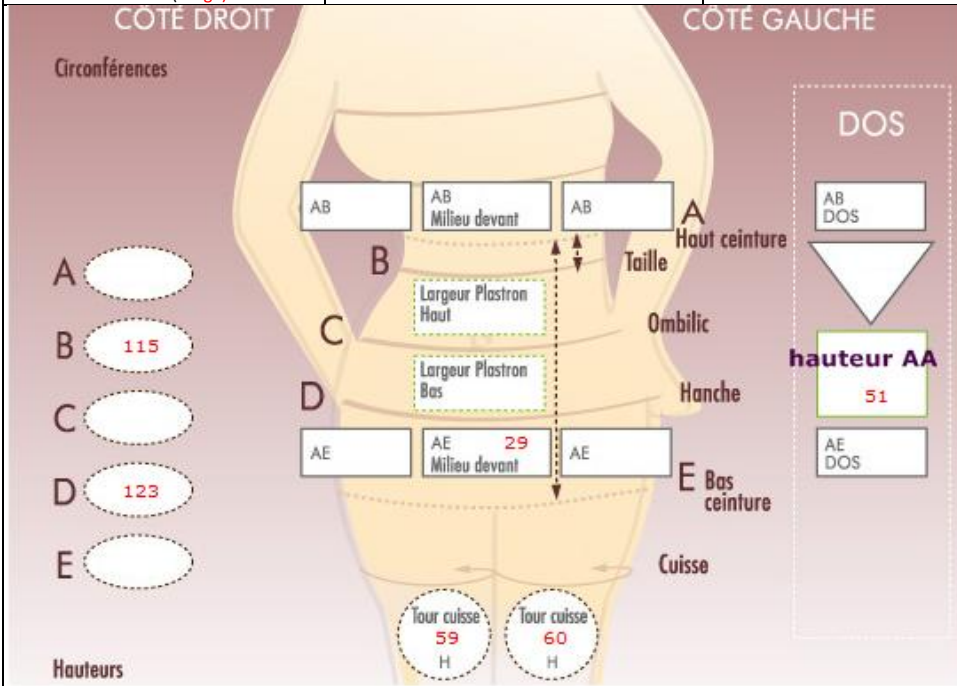

AE = 29 cm




placer le mètre ruban en bas du pubis (entrejambe) et remonter sur le ventre (en suivant la courbure) jusqu'en haut du produit (position : ombilic milieu devant, taille ou sous poitrine... en fonction de la hauteur souhaitée)

mesures facultatives

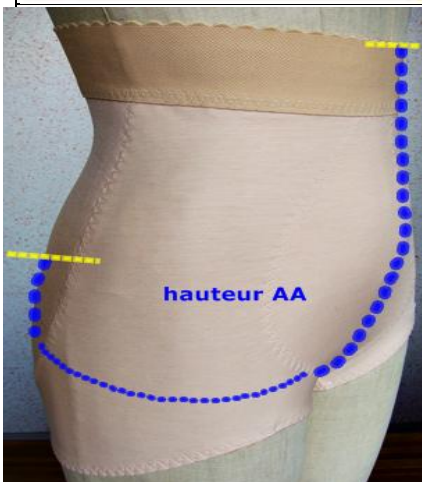

AA = 51 cm

placer le mètre ruban sur les fesses (en haut du pli fessier) et remonter sur le ventre (en suivant la courbure) jusqu'en haut du produit (position : ombilic milieu devant, taille ou sous poitrine... en fonction de la hauteur souhaitée)

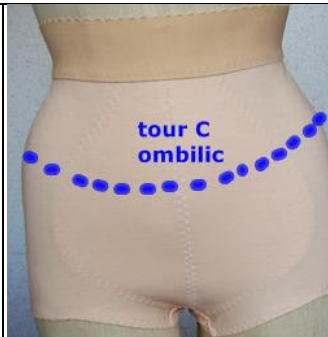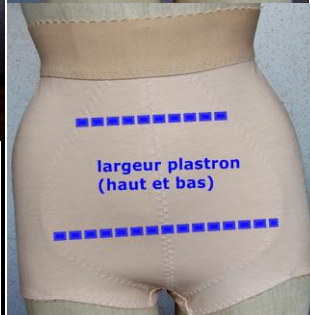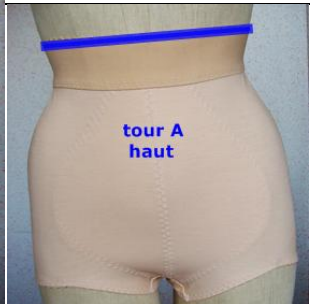

mesure à renseigner en cas de ventre bombé



mesure à renseigner en cas de ventre en tablier (tombant)

