

**PANTY GAINE**


**mesures obligatoires**

\*circonférences prises **debout sans serrer** avec un mètre ruban sur la peau (ou sur un vêtement léger non compressif)


\*les éventrations et hernies **réductibles** doivent être comprimées lors de la mesure

\* préciser en spécificité si technique de prise de mesure différente (assis, couché...)


exemple de formulaire avec valeurs saisies (rouge)

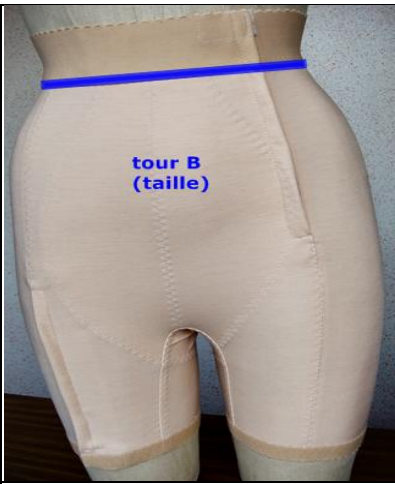



**B = 130 cm**

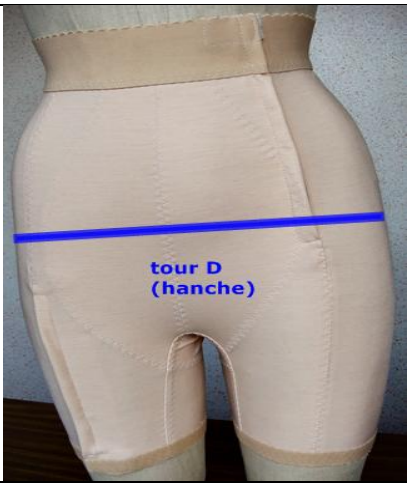


**D = 165 cm**

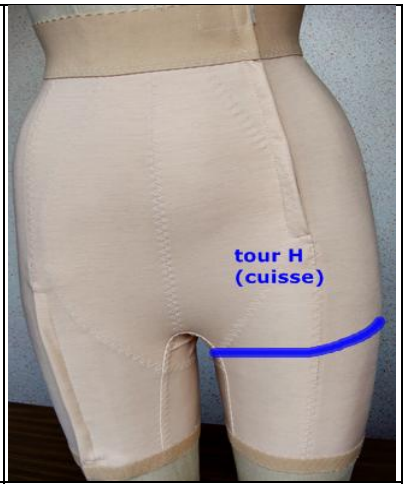

**H=61droit/62gauche**

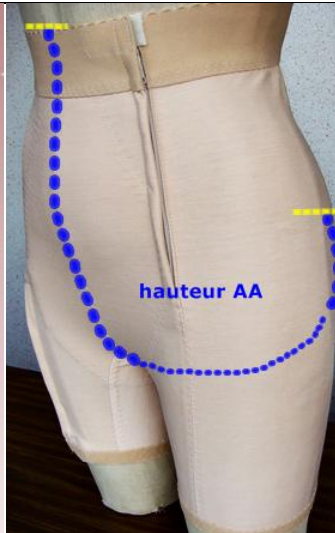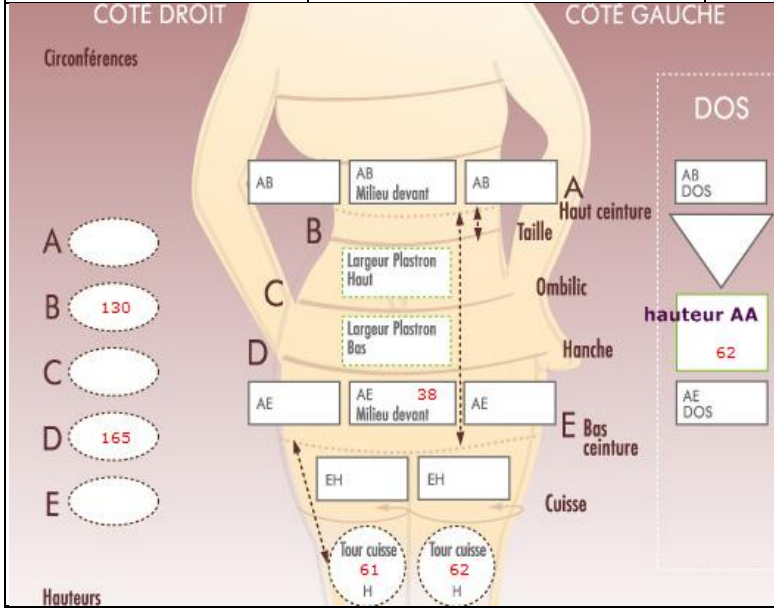


**AA = 62 cm**

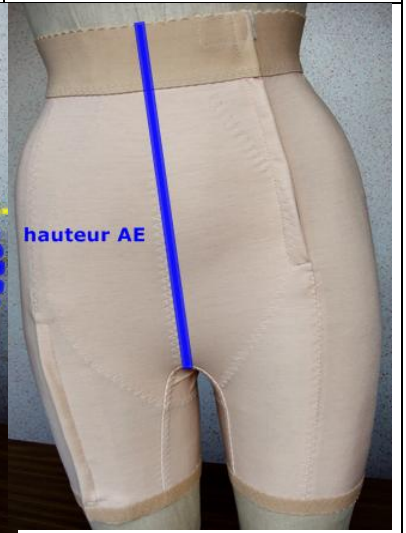

**AE = 38 cm**

voir fiche GAINÉ pour description prise de mesure AA et AE

**mesures facultatives**

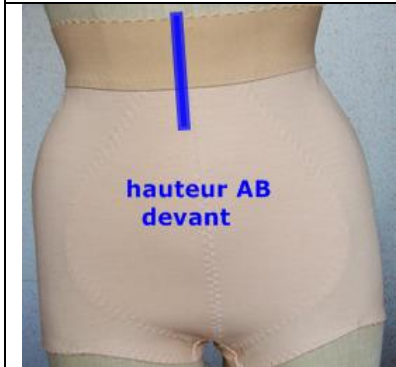


**hauteur AB devant**




**tour A haut**

"plastron en forme " pour ventre bombé ou tablier

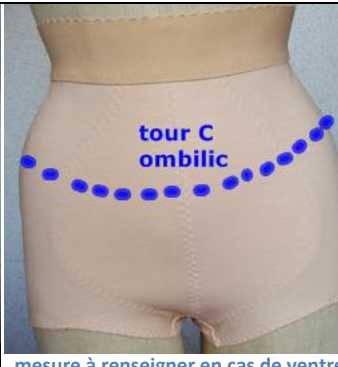

**tour C ombilic**

mesure à renseigner en cas de ventre bombé

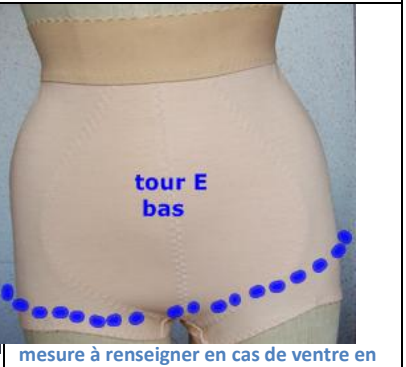

**tour E bas**

mesure à renseigner en cas de ventre en tablier (tombant)



**largeur plastron (haut et bas)**


"plastron losange" pour ventre plat ou légèrement bombé (ne pas sélectionner ventre bombé)



**hauteur EH**



**hauteur AE (côté)**

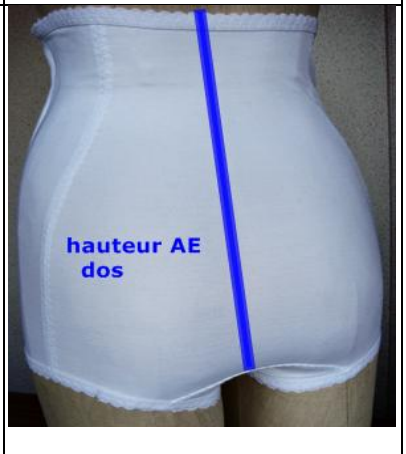

**hauteur AE dos**